


# Arco de tracción alta Great Lakes NOLA

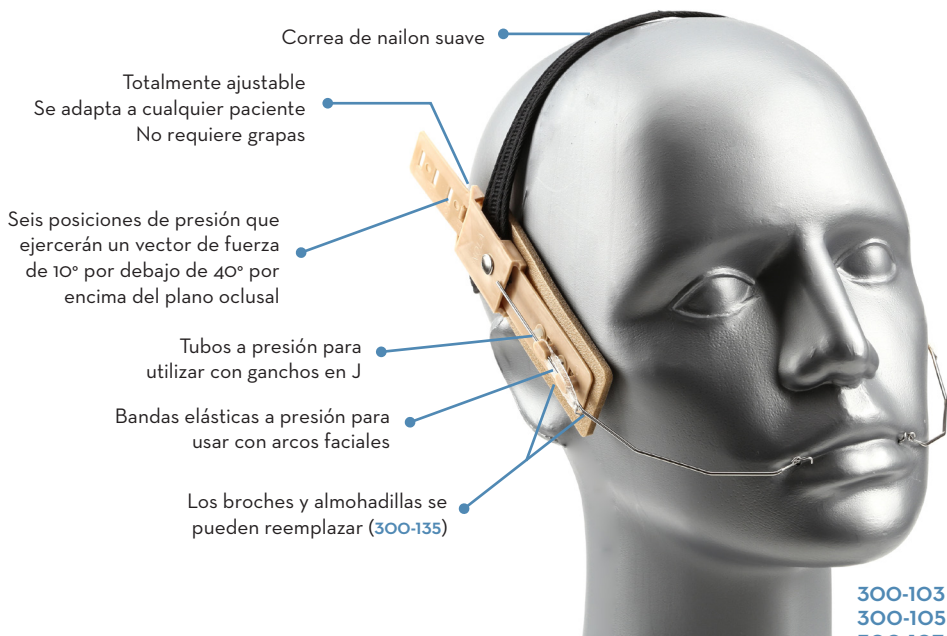

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS AL DORSO ►

## Ventaja de seguridad del aparato extraoral con gancho en J de NOLA

En comparación con los dispositivos desmontables que se utilizan con los arcos faciales actualmente disponibles, el aparato extraoral con gancho en J es igual o más seguro. Los arcos faciales son potencialmente peligrosos porque ambos lados están conectados manteniendo los extremos internos del arco centrados con la cara.

Además, la mayoría de los dispositivos desmontables permiten sacar el arco facial de la boca antes de que se alcance una fuerza de rotura.

## El gancho en J tiene las siguientes ventajas:

1. Los ganchos derecho e izquierdo no están conectados. Si alguno de los dos se suelta, se saldrá y se desprenderá de la cara.
2. El recorrido hacia adelante y hacia atrás del gancho en J está limitado por el extremo doblado y el gancho elástico soldado. (Fig. A)
3. El arco de tracción alta ofrece la ventaja adicional de que puede desabrocharse el tubo del bloqueo de ajuste si se produce un tirón fuerte repentino.



Fig. A

## ARTÍCULO

NÚMERO  
DE PEDIDO

ARTÍCULO	NÚMERO DE PEDIDO
<b>Arcos, ganchos en J y accesorios</b>	
Arco de tracción variable (5 por paquete)	Negro 300-100 Azul marino 300-101 Marrón 300-102
Arco de tracción alta (5 por paquete)	Negro 300-107 Azul marino 300-103 Marrón 300-105
Arco de ajuste rápido (5 por paquete)	300-104
Gancho en J de retracción del arco cuspídeo/deslizante (5 pares/paquete)	300-121
Gancho en J de retracción bicuspídea (5 pares/paquete)	300-122
Gancho en J de retracción del arco cuspídeo/deslizante: largo (5 pares/paquete)	300-123
Gancho en J de alta retracción (5 pares/paquete)	300-125
Gancho en J de alta retracción: largo (5 pares/paquete)	300-126
Tubos de acero inoxidable para arco de tracción variable (10 por paquete)	300-131
Tubos a presión para arco de ajuste rápido (10 por paquete)	300-132
Ganchos a presión para arco de ajuste rápido (10 por paquete)	300-133
Almohadillas de tela deslizables (20 por paquete)	300-134
Almohadillas a presión para todos los arcos (20 por paquete)	300-135
<b>Aparato extraoral de protracción y piezas de recambio</b>	
Máscara facial pequeña	300-306
Máscara facial grande	300-307
Hickham pequeño	300-308
Hickham grande	300-309
Correa para la cabeza Hickham (ambos tamaños)	300-312
Correa para la frente y contratuercas para máscara facial (ambos tamaños)	300-313
Contratuercas para correa de frente (2 por paquete)	300-314
Puntas protectoras de plástico (10 por paquete)	300-316

**¡RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LOS MÉDICOS!** Para evitar el riesgo de lesiones oculares, asegúrese de informar a los pacientes y a los padres sobre las precauciones de seguridad adecuadas al colocar y extraer el aparato. También advierta a los pacientes que no deben jugar de forma brusca o correr riesgos innecesarios mientras lo lleven puesto.



**Great Lakes**<sup>®</sup>  
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150  
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626  
GREAT PEOPLE. GREAT PRODUCTS. GREAT LAKES.